

泡立ちがいい

リントが出にくい

あらゆる部位に対応

ブラシから  
**ラヴァーレ**へ

ブラシに代わる新しい洗浄サポート製品



クリーン  
包装

# ブラシに代わる新しい洗浄サポート製品


ブラシによる手洗いでは、手荒れの問題がスタッフを悩ませています。また、従来のプロトコルでは皮膚を傷付け、手から更に細菌が剥離する可能性をCDCも指摘しています。

そこで私たちはこれらの不具合を解消する、全く新しい「洗浄サポート製品」を開発しました。

## 手に優しく、洗浄力にすぐれています

### 2層構造 あらゆる部位に対応

- 表と裏で風合の異なる2種類の不織布  
洗浄部位に応じて洗浄面を選択できます。

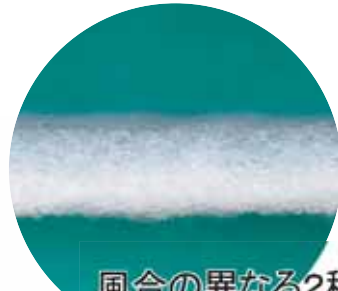

風合の異なる2種類の  
極細繊維が1枚の  
ラヴァーレに

### 洗浄力 泡立ちがいい

- 疎水性のある極細ポリエステル繊維  
濡らしても大きさ厚みが変わらず、薬液が  
湿潤しやすいので、高い洗浄力を発揮する  
ことができます。

### 脱落防止 リントが出にくい

- アクリル樹脂をスプレー  
アクリル樹脂をスプレーし、リントの発生を防止しています。  
同時に、不織布に柔軟性も与えています。

## 経費の大幅削減が可能です

開発した洗浄サポート製品「ラヴァーレ」は、素材に不織布を採用しました。織度を最適化したため泡立ちが良く、やさしく洗い上げます。しかもブラシよりもランニングコストを抑えることができます。

### トータルコストの比較

	ラヴァーレ	小	再生	滅菌	保管
洗浄機能	◎	◎	再生時に洗浄コスト	滅菌コスト必要	クリーン保管が必要
コスト	小	大	再生時に洗浄コスト	滅菌コスト必要	クリーン保管が必要

ラヴァーレ: ディスポ・タイプ (使用後は廃棄するので、洗浄コスト不要)、クリーン包装 (クリーンルームで製造・包装しているので常に清潔)、保管コスト不要 (クリーン包装なので保管場所を選びません)

ブラシ: 再生時に洗浄コスト、滅菌コスト必要、クリーン保管が必要

### ラヴァーレを使った手洗方法のご提案

8ステップ(合計 200秒=3分20秒)のしっかり&スピーディ洗浄

#### STEP 1 予備的手洗 肘から指先

洗浄剤をワンショット(5ml程度)付け肘関節まで素洗い。  
よく泡立てて、指先から肘関節まで洗う。




両手で



#### STEP 4 手のひら

他方の手でラヴァーレをしっかり持ち、手の皺に洗浄剤が浸透するよう縦・横・斜めに小刻みに洗浄する。

また、最後にラヴァーレを挟み込んで合掌するように手を合わせ指の間を洗浄する。

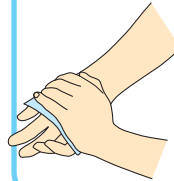


片手10秒×2



#### STEP 2 爪指肉洗い

手のひらにくぼみを作るようにラヴァーレのをせ、親指でくぼみをつまむようにして洗います。

この時爪と指肉の間を意識して開いたり閉じたりし、洗浄剤が十分に入り出すように・反復させて洗います。

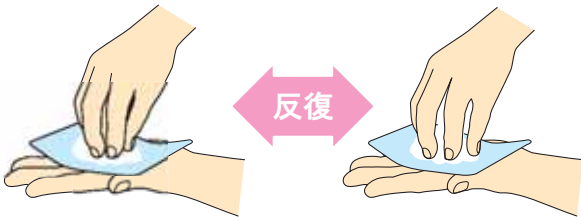

片手20秒×2




#### STEP 5 手の甲



片手10秒×2



#### STEP 6 手首から前腕1/2まで洗う

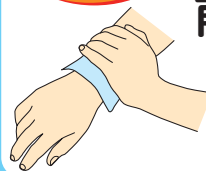

片手10秒×2




#### STEP 3 指を包みこむように

ラヴァーレで指を包み、ひねるよう前後させます。

この時、爪と指肉の間に洗浄剤を浸透させるようにして洗います。


また、指の皺にも洗浄剤を浸透させるために、包んだ指を意識して回しながら抜き差しします。

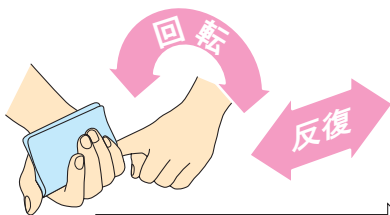

片手20秒×2



#### STEP 7 肘関節のところまで洗う

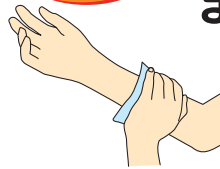

片手10秒×2



#### STEP 8 流水で全体を流す



両手で



近年、通常の手指洗浄工程の後に・・・

エタノール含有の速乾性手指消毒薬を用いてラビング(擦式)法を実施し、除菌を行う衛生的(感染予防)手洗が一般化しております。

# ラヴァーレを使用したシステム例

ホルダーは2種類をご用意

## ラヴァーレホルダー



ラヴァーレの箱をしっかり保持するアクリル樹脂製のスケルトンモデル。ラヴァーレを箱ごと簡単に交換できます。

## ラヴァーレ自動ホルダー



ユニットと同じく、ヘアラインのステンレス製で、従来のブラシホルダーと同様に、光センサーでラヴァーレを一枚一枚自動的に供給する装置です。

水道水対応手洗装置「フレックス」と組み合わせて



ソルスパタオルホルダーとラヴァーレ自動ホルダーを併用することで、従来どおりのオペレーションが可能になり、違和感なくフレックスをお使いいただけます。

# 主な仕様

## ラヴァーレ



箱の内側にPP加工を施しよりクリーンに



品番	LV-20
材質	ポリエステル繊維・アクリル樹脂
1枚サイズ	95(W)×135(D)×6(T) mm
入り数	30枚/箱
出荷単位	20箱/ケース

クリーンなPP包装  
(未滅菌)

## ラヴァーレホルダー



品番	LV-HS
サイズ	115(W)×150(D)×100(H) mm
質量	130g
材質	アクリル樹脂

## ラヴァーレ自動ホルダー



品番	LV-HA
サイズ	103(W)×145(D)×143(H) mm (突起部を除く)
質量	1.3Kg
電源	AC100V (ACアダプター)

※ 商品は改良のため、予告なく仕様変更することがあります。ご了承ください。

**AZTECH** アステック株式会社

URL: <http://az-tech.co.jp/index.html>

東京本社 〒113-0033  
東京都文京区本郷3-9-11  
TEL.03-3815-0065  
FAX.03-3815-0974

大阪営業所 TEL.06-6442-1405  
福岡営業所 TEL.092-573-0016



このカタログの印刷には、環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。