

# 高性能 滅菌タオル ソルスパ 滅菌タオル



## 優れた吸水性

素早い拭き取りが可能です。

## リントフリー

リントを抑えたクリーン仕様。

## 引張強度

十分に吸水した状態で、強い拭き取りに耐えられます。

## EOG滅菌済み

1箱ずつ完全密封し、クリーンな状態でお届けします。

## 専用ホルダー






センサーで開閉し、UV殺菌灯を内蔵しておりますので、最後の1枚までクリーンなタオルを供給します。



## ソルスパ 滅菌タオル TW-160

入数：60枚入り×20箱/ケース

吸水速度、強度  
リントフリー等に  
優れています。

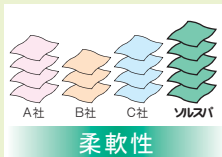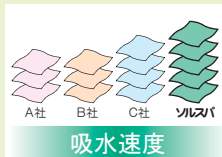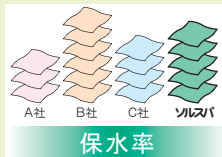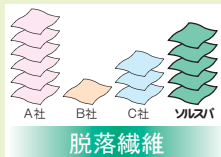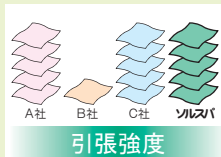

### ユニット設置例



### ソルスパタオルホルダー



ソルスパ滅菌タオルをクリーンに自動供給  
ソルスパタオルホルダー

**非接触で自動開閉**

光電センサーで開閉しますので、手洗後の清潔な手のままソルスパタオルを取り出せます。

**ダブルUV照射**

取出口のタオル固定ガイド上で、タオルの表裏全面に高強度UV(6W)を照射し、ソルスパタオルへの汚染をブロックします。

**殺菌灯の点灯確認ランプ**

UV殺菌灯の点灯状況は本体前面で確認できます。また、UV殺菌灯の寿命もお知らせします。




TW-H11D

**ソルスパ  
タオルホルダー**

寸法：410(H)×278(W)×238(D)mm  
UVランプ：6W×2本(長寿命タイプ)  
消費電力：40VA以下

TUV-6W (消耗部品)  
ソルスパタオルホルダー用  
**UVランプ**

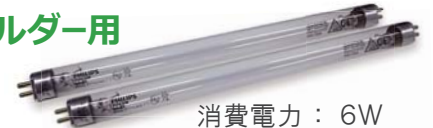

消費電力：6W  
使用数：2本/台

ソルスパタオルホルダー 殺菌効果測定試験

試験装置：ソルスパタオルホルダー  
試験菌：Bacillus subtilis var.niger ATCC9372

(アテストEO.ガス用：3M社製の4アンプルのストリップを)  
滅菌水1mlに懸濁して試験菌芽胞液を調整

①5×2cmの大きさのアルミホイルに試験菌芽胞液0.01mlを塗布し35℃で30分乾燥する。

②タオルホルダー内底部部の9ヶ所に、このアルミホイルを貼り付けソルスパタオルをセットし、1枚引き出しておく。

③殺菌灯を点灯し、5・30・60・120分後にアルミホイルを取外し付着菌数を測定する。

設置No.	照射時間			
	5分	30分	60分	120分
1	<10	<10	<10	<10
2	<10	<10	<10	<10
3	<10	<10	<10	<10
4	<10	<10	<10	<10
5	<10	<10	<10	<10
6	<10	<10	<10	<10
7	<10	<10	<10	<10
8	<10	<10	<10	<10
9	<10	<10	<10	<10

**タオルホルダー  
専用スタンド**

TW-S11D

- 壁などに取り付けなくてもタオルホルダーをご使用いただけます。
- 移動の楽なキャスター付き。



寸法：1760~1910(H)×400(W)×536(D)mm

※ タオルホルダーを含む